

MedRhein POCT-NAT-Lösung für Tiere

Pluslife

FHV-1/C.felis/M.felis

Nukleinsäure-Testkarte

Einfache Bedienung mit hoher Genauigkeit,
Ergebnis in 35 min

POCT

Diagnostik beim ersten Besuch möglich




Materialien für den Test



* Alle Materialien finden Sie unter: www.medrhein.de

1. MedRhein TG01 Pluslife POC-NAT-Testgerät (VET)
2. App/PC-Software PluslifePad
3. MedRhein KT01 Pluslife Katze Multiplex FHV-1/C.felis/M.felis Nukleinsäure-Testkarte

Ablauf des Tests

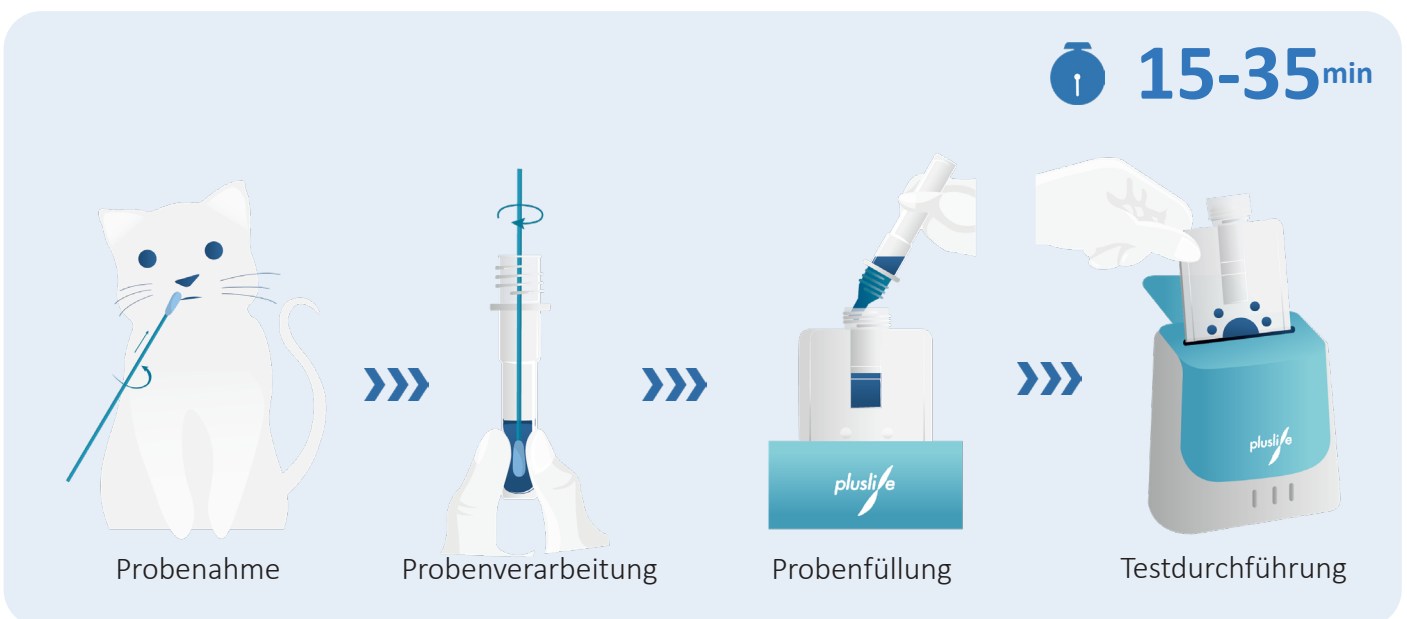

Ergebnisauswertung



Anmerkung: "+" für positiv, und "-" für negativ.


Resultat			Ergebnisauswertung
FHV-1	C.felis	M.felis	
+	-	-	Die Probe wurde als FHV-1 POSITIV, C.felis und M.felis NEGATIV bestimmt.
-	+	-	Die Probe wurde als C.felis POSITIV, FHV-1 und M.felis NEGATIV bestimmt.
-	-	+	Die Probe wurde als M.felis POSITIV, FHV-1 und C.felis NEGATIV bestimmt.
+	+	-	Die Probe wurde als FHV-1 und C.felis POSITIV, M.felis NEGATIV bestimmt.
+	-	+	Die Probe wurde als FHV-1 und M.felis POSITIV, C.felis NEGATIV bestimmt.
-	+	+	Die Probe wurde als C.felis und M.felis POSITIV, FHV-1 NEGATIV bestimmt.
-	-	-	Die Probe wurde als NEGATIV für FHV-1, C.felis und M.felis bestimmt.
+	+	+	Die Probe wurde als FHV-1, C.felis und M.felis POSITIVE bestimmt.

Ungültig

Test sollte wiederholt werden. Möglicher Grund:
 1. Die Probenmenge ist unzureichend.
 2. Die Reaktion wird gehemmt.
 2. Betriebsfehler aufgetreten.

MedRhein TG01 Pluslife POC-NAT-Testgerät (VET)

Abmessungen	101 × 86 × 63 mm
Gewicht	210 g
Durchsatz	1 Test in 35 min
Komponenten	1 × Testgerät, 1 × Cardholder, 1 × USB-C Kabel, 1 × Stromkabel, 1 × Adapter für Stromkabel

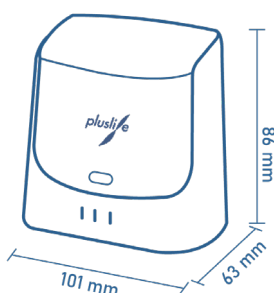

Mehrere Tests durch externe Komponente erweitert möglich


MedRhein KT01 Pluslife Katze Multiplex FHV-1/C.felis/M.felis Nukleinsäure-Testkarte

Spezifikation	10 Test/Kit
Komponenten	10 × Multiplex FHV-1/C.felis/M.felis Nukleinsäure-Testkarte, 10 × Nukleinsäure-Freisetzungsreagenz, 10 × Probenutpfer, 10 × Abfalltüte (Biohazard-Markierung)



Nachgewiesene Erreger	FHV-1, C.felis und M.felis
Probenahme	Augen, Nasal, Oropharyngeal
Nachweisgrenze (LoD)	FHV-1 1500 Kopien/mL, C.felis 1200 Kopien/mL, M.felis 1600 Kopien/mL
Wiederholbarkeit	Intra-Assay-Wiederholbarkeit 100%; Inter-Assay-Wiederholbarkeit 100%
Lagerung	2-30°C für 9 Monate haltbar
Transport	Raumtemperatur (2-28 °C) transportierbar

Vorteile auf einen Blick

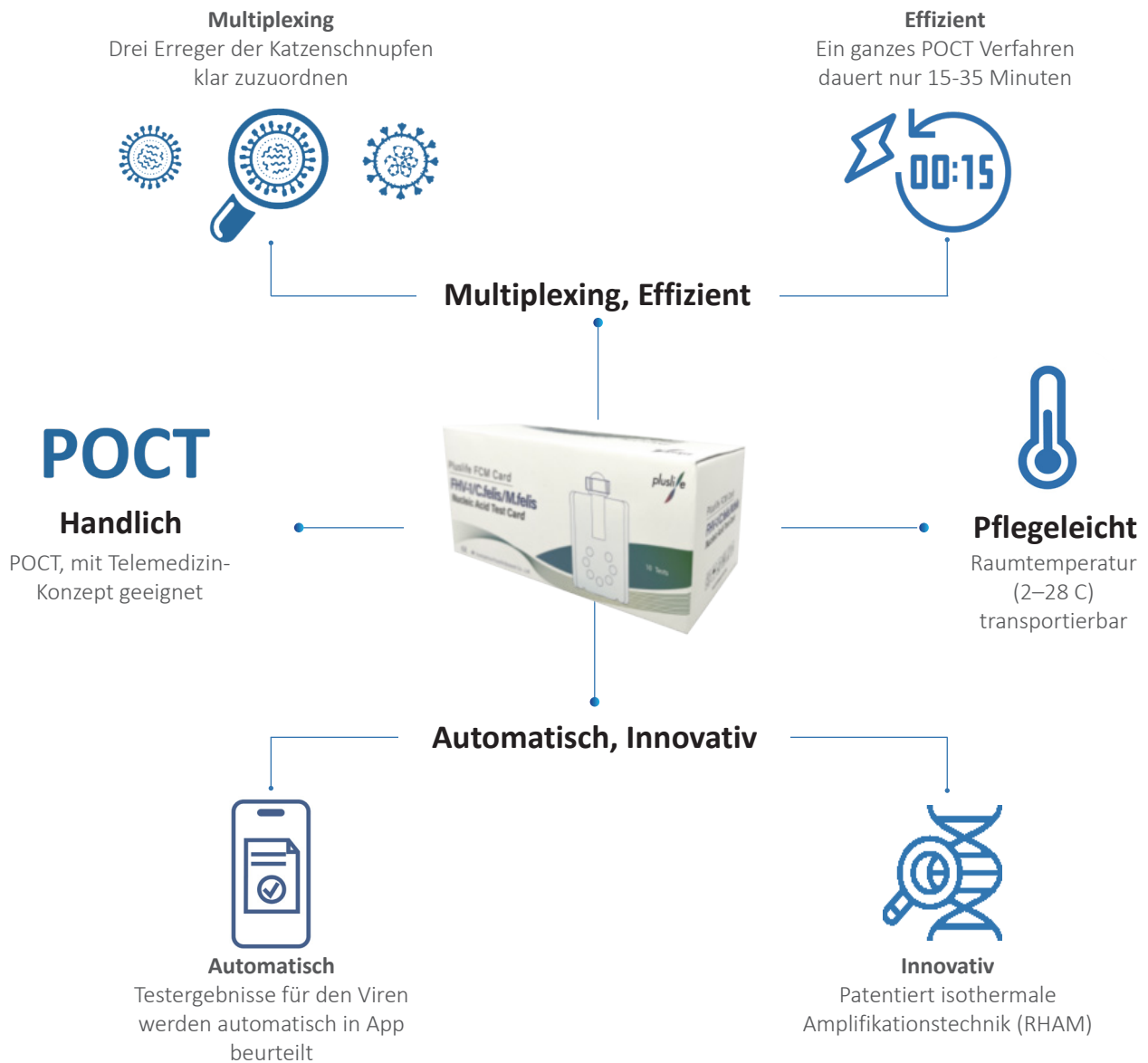

Anwendungsgebiete



Tierklinik



Tierhandlung



Tier CDC



MedRhein

MedRhein GmbH
Platinweg 14, 30823 Garbsen,
Deutschland
Tel: 05137 9379197
E-Mail: service@medrhein.de
Web: www.medrhein.de